

体征监护仪（WiFi版）


—— 安装调试使用说明 ——



LonBon 来邦

一、安装调试

体征监护仪安装在床头实时监测长者生命体征。产品通过专业传感器多维度采集长者的体征数据，包括心率、呼吸、离床等数据，实时上报至后台，并通过算法实时分析，出现异常能立即自动报警，提醒护理人员及时处理。

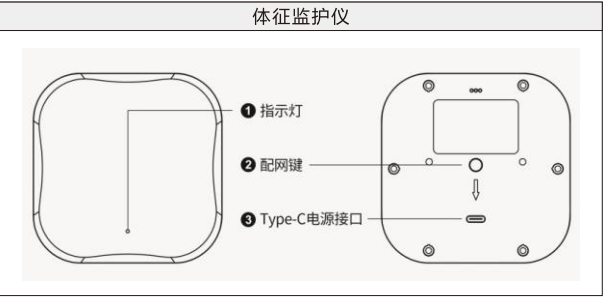


1、产品安装图

(1) 设备支持两种安装固定方式：螺丝/3M 胶，且设备角度可根据实际场景进行调整。

(2) 设备安装高度建议为距床面0.8~1米。


• 将设备插入支架内

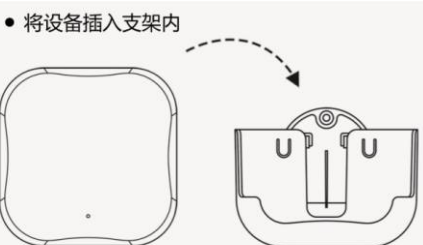


• 调整设备角度



①

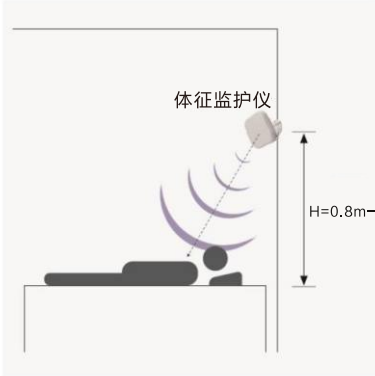

②

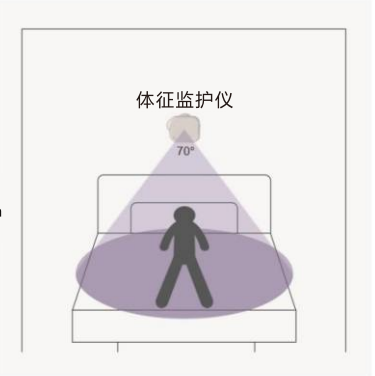

二、使用说明

- 1、注意事项**
- (1) 一张床只能安装一个体征监护，且只能监测一人。
 - (2) 本产品并不是医疗设备或者防猝死设备，使用者不应该完全依赖而忽略对长者的照顾。
 - (3) 此产品不适用于体内有金属支架或戴心脏起搏器的人群！
 - (4) 使用此产品时，应保证按照安装要求进行安装，否则会导致监测不准确。
 - (5) 此产品仅支持2.4G的WIFI网络，不支持5G 频段。
- 2、设备绑定**
- (1) 体征监护仪正常工作后，打开“机构养老”/“社区养老”App，进入“长者房间设备绑定”界面，选择需要绑定房间进入绑定设备(若无房间，请先在对应的管理平台上添加好房间)；
 - (2) 下拉到床位设备，点击“请选择设备绑定”，在体征监护仪里点击“去绑定”，将手机尽量靠近体征监护仪，按照App上的提示进行按步骤即可完成绑定。

三、技术参数

通讯方式：	WiFi（2.4G）	供电方式：	适配器供电
供电接口：	Type-C	工作电压：	5V
工作温度：	-20℃~+50℃	工作湿度：	≤80%（无凝结）
尺寸：	90*90*17mm	重量：	100g